

DOĞRU MASKE KULLANIMI

DOĞRU MASKE KULLANIMI

GİYERKEN



1
Ellerinizi su ve sabun ile 20 saniye boyunca iyice temizleyin.



2
Maskeyi takarken sadece lastiklerinden tutun.



3
Üst taraftaki metal şeridi burun köprüsünün üzerinde sabitleyin.



4
Ağız ve çeneyi tam kapatacak, hava geçişine izin vermeyecek şekilde maskeyi genişletin.



5
Maskeyi kullandığınız sürece dış yüzüne kesinlikle dokunmayın.

TAKARKEN



Maskeyi lastiklerinden veya iplerinden tutarak çıkarın ve çöpe atın.

ÇIKARIRKEN

Özlem KALAY
Etlik Anadolu Lisesi Müdürü